

Keratosept Augentropfen 10 ml

Preis: 8,49 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	10 ml
Form	Tropfen
Inhalt	10 ml
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Ein Medizinprodukt in Form eines Hydrogels mit beschichtenden, befeuchtenden und schützenden Eigenschaften. Die Anwendung der Tropfen unterstützt die Regeneration des Hornhautepithels, das durch das Tragen von Linsen, Sonneneinstrahlung, künstliches Licht oder Bildschirmarbeit geschädigt wurde. **Zusammensetzung** Polyvinylalkohol 1,25%, Dexpanthenol, Hexamidindiisothionat 0,050%, Polyhexanidhydrochlorid 0,0001%, Methylsulfonylmethan, Dinatriumvermate, zweibasiges Natriumphosphat, einbasiges Kaliumphosphat, gereinigtes Wasser. **Packungsinhalt** Eine 10 ml Tropfflasche. **Wirkung** Die Wirkung des Produkts beruht auf den Eigenschaften der fünf enthaltenen Inhaltsstoffe - Polyvinylalkohol - beschichtet, befeuchtet, wirkt viskoelastisch, mukoadhäsiv und schützt; - Dexpanthenol - schützt das Epithel vor Schäden; - Hexamidindiisothionat, Polyhexanidhydrochlorid, Dinatriumedetat - Substanzen mit antimikrobieller Wirkung. **Wirkung** Das Medizinprodukt Keratosept hilft bei der Wiederherstellung von Hornhautepithel, das durch mechanische Einflüsse (Kontaktlinsen) oder Schäden durch Klimaanlagen, Sonnenlicht, künstliche Beleuchtung oder längeres Starren auf einen Fernseh- oder Computermonitor beschädigt wurde. Die im Präparat enthaltenen antimikrobiellen Substanzen gewährleisten die Sterilität der Tropfen bis zum Öffnen. Sie schützen das Sehorgan auch vor Reizungen und Infektionen (verursacht durch ungünstige äußere Faktoren wie Smog, Rauch, Staub, verschmutzte Luft). Der Gehalt an Polyvinylalkohol in einer Konzentration von 1,25% macht die Tropfen dem natürlichen Tränenfilm ähnlich. Dadurch befeuchten, beschichten und schützen sie das Organ, ohne die Sehkraft zu beeinträchtigen. Die Hydrogel-Formel sorgt für eine verlängerte Wirkung auf der Oberfläche der Augenschleimhaut und erhöht so die Wirksamkeit des unterstützenden Vitamins beim Wiederaufbauprozess des Epithels. Die Tropfen haben eine Reaktion, Viskosität und Osmolarität, die vollständig mit dem Augengewebe und der Tränenflüssigkeit kompatibel sind. **Anwendung** Tropfen Sie 1-2 Tropfen des Produkts in den Bindehautsack. Tragen Sie das Produkt 2-3 mal täglich auf, bei Bedarf auch öfter. **Vorsichtsmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen** Lesen Sie vor der Anwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung. Nicht anwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch reagieren. Wenn beunruhigende Symptome oder Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung zuvor geöffnet oder beschädigt wurde. Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 30 Tagen verwenden. Die Oberfläche des Auges nicht mit der Tropferspitze berühren. Nicht verwenden, wenn Symptome einer Augeninfektion vorliegen. **Hinweise** Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung oder dem Etikett. **Verwendung des Produkts mit anderen Medikamenten** Verwenden Sie es nicht gleichzeitig mit anderen Augentropfen. Das Produkt enthält keine quaternären Ammoniumsalze, daher kann es von Trägern harter und weicher Kontaktlinsen verwendet werden.