

COMPEED Fingerabdruckpflaster mittel 10 Stück



Preis:7,21 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Pflaster
Inhalt	10 Stück
Marke Hersteller	JOHNSON & JOHNSON
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Action Compeed wirkt wie eine zweite Haut. * Bietet optimale Polsterung gegen Reibung und Druckaufbau * Befeuchtet und erweicht die Hühneraugen, um sie sanft, aber effektiv zu entfernen Indikationen Anwendung:auf engen Schuhen, um die Bildung von Hühneraugen zu verhindern, auf bestehenden Hühneraugen, um sofortige Schmerzlinderung zu bringen. Dosierung Waschen und trocknen Sie die betroffene Stelle. Achten Sie darauf, dass die Hautoberfläche nicht mit Creme oder Öl eingefettet ist. Wenden Sie COMPEED nicht auf einer infizierten Wunde an. # Für beste Ergebnisse erwärmen Sie das Pflaster eine Minute lang in der Hand. # Entfernen Sie zunächst das Schutzpapier mit dem Muster und den größten Teil des weißen Papiers und halten Sie das Pflaster vorsichtig am verbleibenden weißen Papier fest. Berühren Sie die Klebeschicht nicht mit den Fingern. # Legen Sie das Pflaster mit der integrierten Scheibe auf den Abdruck, entfernen Sie das restliche weiße Papier und kleben Sie das Pflaster vorsichtig auf, wobei Sie darauf achten, dass die Ränder des Pflasters fest auf der Haut kleben. # Nach maximal 48 Stunden sollten Sie das Pflaster entfernen. Tauchen Sie die betroffene Stelle fünf Minuten lang in warmes Wasser ein, bevor Sie die aufgeweichte Haut entfernen. Wiederholen Sie diese Behandlung je nach Bedarf für weitere 14 Tage.