

SALVEQUICK MED Blister Rescue Fersenpflaster 5 Stück



Preis: 5,54 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	5 ct
Form	Slice
Inhalt	5 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	ORKLA CARE S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Das Rescue Original Blasenpflaster ist ein Blasenpflaster, das einen innovativen Hydrogel-Verband enthält, der nicht an der Blase klebt. Es schützt die Blase, verringert den Druck, bleibt gut an Ort und Stelle und lässt sich leicht und schmerzlos entfernen, ohne die Blase zu beschädigen. Diese neue Art von Pflaster ist für Blasen gedacht, die sich bereits gebildet haben. Die Packung enthält 5 Blasenpflaster, die speziell für Fersen geeignet sind. **Wie anwenden?** 1. Waschen Sie die Wunde und die umliegende Haut mit lauwarmem Wasser oder Wundreinigungsmittel. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Haut vollständig trocken, sauber und nicht fettig ist, frei von Emulsionen und Lotionen. 3. Reißen Sie den Schutzbeutel des Pflasters auf, um ihn zu öffnen. 4. Entfernen Sie das Schutzpapier vom Pflaster (Markierung 1). 5. Kleben Sie das Pflaster vorsichtig auf die Mitte der Blase und versuchen Sie, die Falten zu glätten, falls sich welche gebildet haben. Entfernen Sie dann die weiße gefaltete Überlappung. 6. Entfernen Sie die obere Kunststoffschicht (gekennzeichnet mit Nummer 2). Sie können das Pflaster so lange auf der Haut lassen, bis es sich von selbst ablöst, jedoch nicht länger als fünf Tage. Wechseln Sie das Pflaster, wenn der Gelverband gesättigt ist. **Wann anwenden?** Das Pflaster ist zum Schutz von Blasen bestimmt, wenn diese intakt, gerissen oder abgeschürft sind. Hinweis: Menschen mit beeinträchtigter Wundheilung, z. B. Diabetiker, ältere Menschen, sollten die Blasenstelle regelmäßig kontrollieren. Nicht auf blutigen oder tiefen, stark blutenden oder infizierten Blasen anwenden. **Packungsinhalt** 5 x 42mm x 72mm