

SALVEQUICK MED Blister Rescue Mix Blisterpflaster 6 Stück



Preis: 6,89 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	6 ct
Form	Slice
Inhalt	6 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	ORKLA CARE S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Rescue Mix Blasenpflaster sind ein Set aus Fersen- und Zehenblasenpflastern mit einem innovativen Hydrogel-Verband, der nicht an der Blase klebt. Sie schützen die Blase, verringern den Druck, bleiben gut an Ort und Stelle und können mühe- und schmerzlos entfernt werden, ohne die Blase zu beschädigen. Diese neue Art von Pflaster wurde entwickelt, um Blasen zu schützen, die bereits Zeit hatten, sich zu bilden. Die Packung enthält 3 Blasenpflaster speziell für Fersen und 3 Pflaster für Zehen. **Wie wird es angewendet?** 1. Waschen Sie die Wunde und die umliegende Haut mit lauwarmem Wasser oder Wundreinigungsmittel. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Haut vollständig trocken, sauber und nicht fettig ist, frei von Emulsionen und Lotionen. 3. Reißen Sie den Schutzbeutel des Pflasters auf, um ihn zu öffnen. 4. Entfernen Sie das Schutzpapier vom Pflaster (gekennzeichnet mit 1). 5. Kleben Sie das Pflaster vorsichtig auf die Mitte der Blase und versuchen Sie, die Falten zu glätten, falls sich welche gebildet haben. Entfernen Sie dann die weiße gefaltete Lasche. 6. Entfernen Sie die obere Schutzschicht aus Kunststoff (mit der Nummer 2 gekennzeichnet). Sie können das Pflaster so lange auf dem Körper lassen, bis es sich von selbst ablöst, jedoch nicht länger als fünf Tage. Wechseln Sie das Pflaster, wenn der Gelverband gesättigt ist. **Wann anwenden?** Das Pflaster ist zum Schutz von Blasen bestimmt, wenn diese intakt, gerissen oder abgeschürft sind. Hinweis: Menschen mit beeinträchtigter Wundheilung, z. B. Diabetiker, ältere Menschen, sollten die Blasenstelle regelmäßig kontrollieren. Nicht auf blutigen oder tiefen, stark blutenden oder infizierten Blasen anwenden. **Packungsinhalt** 3 x 72mm x 42mm 3 x 56mm x 24mm