

## SALVEQUICK MED Warzenpflaster für Warzen 20 Stück

Preis: 9,73 €



## Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	20 ct
Form	Slice
Inhalt	20 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	ORKLA CARE S.A.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Merkmale** Das Warzenpflaster ist ein Salicylsäurepflaster, das bei der Entfernung von Warzen an der Fußsohle hilft. Diese Methode zur Behandlung von Warzen ist sowohl wirksam als auch schmerzlos: Die Salicylsäure im Inneren des Pflasters schädigt die Hautzellen der Warze, ohne die umliegende Haut anzugreifen. Wenn Sie eine Warze an der Fußsohle haben, können Sie sie mit dem Warzenschutzpflaster entfernen und gleichzeitig verhindern, dass sich die Infektion ausbreitet. Die Packung enthält 20 Warzenpflaster. Je früher Sie mit der Behandlung beginnen, desto schneller werden Sie die Warze los. **Wie wird es angewendet?** 1. Weichen Sie die Warze vor dem Auftragen 5 Minuten lang in warmem Wasser ein. 2. Reinigen und trocknen Sie die Haut und stellen Sie sicher, dass die Stelle, auf die das Pflaster aufgetragen wird, nicht mit Creme oder Ölen gefettet ist. 3. Entfernen Sie das Schutzpapier und vermeiden Sie es, die klebende Seite des Pflasters zu berühren. 4. Tragen Sie das Salicylsäurepflaster direkt auf die Warze auf, so dass sich der zentrale Teil des Pflasters auf der Warze befindet, und achten Sie darauf, dass die Ränder des Pflasters gut an der Haut haften. 5. Lassen Sie es an Ort und Stelle, bis sich das Pflaster abzulösen beginnt. Entfernen Sie das Pflaster nach maximal 48 Stunden. 6. Weichen Sie die betroffene Hautstelle 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, bevor Sie die Warze entfernen. 7. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Nicht länger als 14 Tage anwenden. Hinweis: Die Anwendung des Pflasters bei Kindern oder schwangeren Frauen erfordert die Rücksprache mit einem Arzt. Pflaster sollten nicht von Diabetikern, Menschen mit Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure und Menschen mit schlechter Durchblutung verwendet werden. **Packungsinhalt** 20 Stück