

# Feminum fit Vaginalgel 40 g



Preis: 4,82 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Gel
Inhalt	40 g
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	MIRALEX SP.Z.O.O.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Zusammensetzung** Pflanzliches Glykogen (Phytoglykogen), Milchsäure, Natriumlactat, Propylenglykol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete** FEMINUM fit Vaginalgel ist zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des natürlichen Gleichgewichts des Vaginalmilieus bestimmt. Das Präparat verhindert auch das Auftreten von Beschwerden im Intimbereich, die mit einer Störung dieses Gleichgewichts einhergehen. Zu den Faktoren, die das natürliche Scheidenmilieu gestört haben können, gehören: Antibiotikatherapie, häufige Spülungen, verlängerte Menstruation, häufiger Geschlechtsverkehr, hormonelle Verhütung, Stress. FEMINUM fit Vaginalgel wird während der oralen Antibiotikatherapie und nach Abschluss der oralen und vaginalen Antibiotikatherapie empfohlen. Darüber hinaus reduziert das Gel die Beschwerden bei vaginaler Trockenheit (z. B. beim Geschlechtsverkehr), ermöglicht gynäkologische Untersuchungen und erleichtert bei geringer Anwendung die Anwendung von Tampons, Vaginaltabletten und die Temperaturmessung. **Wirkung** FEMINUM fit Vaginalgel enthält Glykogen pflanzlichen Ursprungs, das eine Nährstoffquelle für Milchsäurebakterien darstellt und so auf natürliche Weise deren Wachstum und die Wiederherstellung der Bakterienflora unterstützt, indem es einen angemessenen sauren pH-Wert in der Scheide aufrechterhält. Gleichzeitig trägt der niedrige pH-Wert des Gels dazu bei, das physiologische Gleichgewicht des Intimbereichs wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten und das Wachstum pathogener Bakterien einzuschränken, wodurch unangenehme Symptome und Beschwerden gelindert werden. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften beseitigt FEMINUM fit Gel Defizite der natürlichen vaginalen Befeuchtung und schützt so vor Abschürfungen, die häufig zu vaginalen und äußeren Genitalinfektionen führen. Bei vaginaler Trockenheit kommt es jedoch beim Geschlechtsverkehr häufig zu Abrasionen der Schleimhaut. Die Scheidenwände sind dann pathogenen Bakterien ausgesetzt, die Entzündungen und Infektionen verursachen können. **Dosierung** Anwendung: Es wird empfohlen, FEMINUM fit Gel sowohl vaginal als auch äußerlich auf die Genitalien einmal täglich (vorzugsweise nachts) oder direkt vor dem Geschlechtsverkehr anzuwenden. Bei Anwendung des Gels zur Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts im Intimbereich sollte, wenn die Symptome nicht innerhalb weniger Tage abklingen, ein Arzt aufgesucht werden. Äußerliche Anwendung: Eine dünne Schicht des Gels sollte auf die äußeren Genitalien und den umliegenden Bereich aufgetragen werden. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, das Präparat in der Richtung von der Vagina zum Anus aufzutragen. Nach der Anwendung die Tube fest verschließen. Vaginale Anwendung: Die vaginale Anwendung wird durch den beigefügten Applikator erleichtert. Zur Anwendung schrauben Sie den Applikator auf die Tube, entfernen die Schutzkappe und drücken das Gel aus, um den Applikator zu füllen. Führen Sie den Applikator in die Vagina ein, drücken Sie die Tube erneut, damit das Gel in den Vaginalkanal gelangt. Reinigen Sie den Applikator nach der Anwendung (vorzugsweise, indem Sie eine kleine Menge des Gels durch die Öffnung drücken und mit einem weichen Papier abwischen) und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf. Wenn Einwegverpackungen verwendet werden, sollten diese entleert und die Verpackungen entsorgt werden, da sie nicht wieder verschlossen werden können. Vaginalgel kann während der Schwangerschaft verwendet werden.