

Delfinspray 15 ml



Preis: 6,94 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Liquid/Spray
Inhalt	15 ml
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	AXPHARM
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Entzündungen des äußeren Gehörgangs, die mit einer Ansammlung von überschüssigem Wasser im äußeren Gehörgang einhergehen - dem so genannten "Schwimmerohr". Besonders empfohlen nach dem Baden, Duschen, nach dem Schwimmen, für Menschen, die Wassersportarten wie Tauchen, Windsurfen, Kitesurfen usw. betreiben. **Wirkung** Entwässert den Gehörgang von überschüssigem Wasser und stellt den natürlichen sauren pH-Wert des Gehörgangs wieder her. **Anwendungsweise** Bevor Sie eine neue Packung zum ersten Mal verwenden, schütteln Sie die Flasche und drücken Sie 3-4 Mal auf den Applikator, bis das Präparat erscheint. Halten Sie die Ohrspitze des Applikators beim Drücken von Ihnen weg. So bereiten Sie den Applikator für die erste, sichere Anwendung des Produkts vor. Bevor Sie Dolphiner anwenden, erwärmen Sie ihn in der Hand auf Körpertemperatur. Zum Auftragen müssen Sie die Ohrmuschel sanft nach oben und nach hinten ziehen. Halten Sie die Flasche in einer vertikalen Position, bringen Sie die Ohrspitze des Applikators näher an den äußeren Gehörgang und drücken Sie 1 oder 2 Mal, um das Produkt in den Gehörgang zu bringen. Um versehentliche Reizungen zu vermeiden, sollte der Applikator nicht in den äußeren Gehörgang eingeführt werden. Wiederholen Sie diese Schritte für das andere Ohr. Wenn die Ohrspitze des Applikators mit dem äußeren Gehörgang in Berührung gekommen ist, kann sie nach Gebrauch mit heißem Wasser abgespült werden. **Zusammensetzung** Isopropylalkohol, Essigsäure, pharmazeutisches Glycerin, Pfefferminzöl