

SALVEQUICK Prävention Fersen Blister Ferse Patch 6 Stück

Preis: 6,94 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	6 ct
Form	Slice
Inhalt	6 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	ORKLA CARE S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Prevention Heels Blister ist ein Blasenpflaster, das aus einem speziellen Hydrokolloidmaterial hergestellt wird. Es reduziert sofort Druck und Reibung. Dieses Blasenpflaster wurde entwickelt, um die Bildung von Blasen zu verhindern. Die Packung enthält 6 Blasenpflaster, die speziell für Fersen geeignet sind.

Wie zu verwenden

1. waschen Sie die Wunde und die umgebende Haut mit lauwarmem Wasser oder Wundreinigungsmittel.
2. stellen Sie sicher, dass die Haut vollständig trocken, sauber und nicht fettig ist, frei von Emulsionen und Lotionen.
- 3 Entfernen Sie das bedruckte Schutzpapier von dem Pflaster.
4. Reißen Sie die Hälfte der Folie entlang der Perforationen ab.
5. Entfernen Sie das Stück von der Folie und kleben Sie es auf die Mitte des Blisters. Zum Entfernen des Pflasters ziehen Sie es einfach von einer Seite ab und dehnen es vorsichtig parallel zur Haut.

Wann ist es zu verwenden?

Dieses Blasenpflaster wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu verhindern. Es sollte verwendet werden, bevor eine Blase entsteht oder wenn eine Rötung auf der Haut aufgetreten ist.

Bitte beachten Sie: Menschen mit gestörter Wundheilung, z. B. Diabetiker, ältere Menschen, sollten die Blasenstelle regelmäßig kontrollieren. Nicht auf blutigen oder tiefen, stark blutenden oder infizierten Blasen anwenden.

Inhalt der Packung

6 x 40mm x 61mm