

SALVEQUICK Prävention Fersen & Zehen Blase 10 Stück



Preis: 8,80 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	10 ct
Form	Slice
Inhalt	10 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	ORKLA CARE S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Prevention Heels & Toes Blister ist ein Set von Pflastern für Blasen an Fersen und Zehen. Die Blasenpflaster sind aus einem speziellen Hydrokolloid-Material hergestellt, das Druck und Reibung sofort reduziert. Diese Art von Blasenpflaster wurde entwickelt, um die Bildung von Blasen zu verhindern. Die Packung enthält 6 Blasenpflaster, die speziell für Fersen geeignet sind, und 4 Pflaster für Zehen.

Wie zu verwenden

1. waschen Sie die Wunde und die umliegende Haut mit lauwarmem Wasser oder einem Wundreinigungsmittel.
2. stellen Sie sicher, dass die Haut vollständig trocken, sauber und nicht fettig ist, frei von Emulsionen und Lotionen.
3. Entfernen Sie das bedruckte Schutzpapier von dem Pflaster.
4. Reißen Sie die Hälfte der Folie entlang der Perforationen ab.
5. Entfernen Sie das Stück von der Folie und kleben Sie es auf die Mitte des Blisters. Zum Entfernen des Pflasters ziehen Sie es einfach von einer Seite ab und dehnen es vorsichtig parallel zur Haut.

Wann ist es zu verwenden?

Dieses Blasenpflaster wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu verhindern. Es sollte verwendet werden, bevor eine Blase entsteht oder wenn eine Rötung auf der Haut aufgetreten ist.

Bitte beachten Sie: Menschen mit gestörter Wundheilung, z. B. Diabetiker, ältere Menschen, sollten die Blasenstelle regelmäßig kontrollieren. Nicht auf blutigen oder tiefen, stark blutenden oder infizierten Blasen anwenden.

Inhalt der Packung

6 x 40mm x 61mm
4 x 21 mm x 64 mm