

NOSKO Nasensauger ab dem 1. Lebenstag 1 op.



Preis: 17,76 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Nasensauger
Inhalt	1 Satz
Marke Hersteller	SALVEO
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Zusammensetzung zwei Nasenreinigungsspitzen: für Kinder von 0 - 6 Monaten für Kinder über 6 Monate eine Bürste zur Reinigung der Nasenspitze **Indikationen** Der Nasensauger hilft Babys, die eine verstopfte Nase haben, denn nur eine saubere und ungehinderte Nase ermöglicht richtiges Atmen, Füttern und ruhigen Schlaf. Mit dem Nosi® Nasensauger-Set bieten wir eine sichere und wirksame Lösung, die einfach zu bedienen und zu reinigen ist und ab dem ersten Lebenstag Ihres Babys verwendet werden kann. **Aktivität** Der Nosi® Nasensauger ist ein medizinisches Gerät, das an jeden Staubsauger angeschlossen werden kann. Es entfernt wirksam und sicher das Nasensekret von Babys und Kindern, die sich nicht selbst schnäuzen können. Eine freie Nase ermöglicht es Kindern, richtig zu atmen, sicher zu essen und ruhig zu schlafen, was in den ersten Lebensjahren besonders wichtig ist. Schonend für die Nasenschleimhaut Einfache Handhabung, leicht zu zerlegen und zu reinigen (Bürste im Lieferumfang enthalten) Geprüfte Qualität, nur in Apotheken erhältlich, mit fachkundiger Beratung **Dosierung** Wir empfehlen, vor dem Gebrauch des Saugers die Nase des Babys gut mit der isotonischen Lösung im Nisita® Spray zu spülen. Nachdem Sie ein Nasenloch des Babys verschlossen und den Sauger eingeschaltet haben, führen Sie die schmalere Spitze des Saugers in das andere Nasenloch ein. Das Nisita®-Set entfernt Sekret mit konstantem Druck, unabhängig von der SaugEinstellung, und schont so die Nasenschleimhaut. Nachdem Sie das Sekret aus Ihrer Nase entfernt haben, schalten Sie zuerst den Staubsauger aus und nehmen dann den Sauger vom Staubsauger ab. Nach dem Gebrauch spülen Sie den Sauger mit einem heißen Wasserstrahl aus und reinigen Sie die Spitze mit der mitgelieferten Bürste. Lesen Sie die Beschreibung sorgfältig