


Plomb-R Provisorische Füllpaste 3g

Preis: 12,24 €

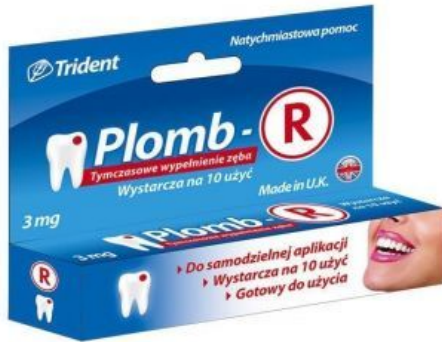

Beschreibung im Wörterbuch

| | |
|------------------|------------------------|
| Form | Paste |
| Inhalt | 3 g |
| Kategorie | Medizinisches Gerät |
| Marke Hersteller | TRIDENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Versand | in 24h |

Produktbeschreibung

Temporäre Zahnfüllung zur Selbstanwendung. Schützt die Zahnhöhle vor irritierenden äußeren Reizen. Anwendungsfertig, ausreichend für ca. 10 Anwendungen. Medizinprodukt schützt den Zahn vor Kälteempfindlichkeit und vor äußeren Faktoren wie Bakterien und Speiseresten. Außerdem schützt es die Zunge und die Wangen vor den scharfen Kanten des Zahnschmelzes. Es schützt vor schmerzhaftem Druck auf das Zahnfleisch an der Stelle, an der der Zahn fehlt. **Anwendungsweise** Drücken Sie eine kleine Menge des Produkts aus und führen Sie es in den Zahn ein, der gefüllt werden muss. Vorsichtig zubeißen. Die Paste härtet bei Kontakt mit Speichel aus. Warten Sie eine Minute und spülen Sie den Mund gründlich mit warmem Wasser aus. Beißen Sie mindestens 15 Minuten lang nicht auf die Füllung und drücken Sie sie nicht in den Zahn. Rufen Sie Ihren Zahnarzt so schnell wie möglich zurück. Nicht länger als 28 Tage ununterbrochen verwenden **Inhaltsstoffe** Zinkoxid 40% und Calciumsulfat 30% der Rest sind synthetische Weichmacher 15%, Kaliumsulfat 10%, Magnesiumsulfat 5% und Spuren von Aromastoffen. **Zusätzliche Informationen** Plomb-R ist rosa gefärbt, da es sich um eine temporäre Füllung handelt. Sein Zweck ist also nicht das ästhetische Erscheinungsbild, sondern die leichte Erkennbarkeit für Fachleute. Nicht verwenden, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch sind. Nicht verwenden bei Entzündung der Zahnpulpa, Freilegung der Zahnpulpa, pathologischer Zahnbeweglichkeit und spontanen Schmerzen. Trocken und kühl aufbewahren. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.