

Dent-Box Prothesenbox 1 Stück



Preis: 3,75 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Box
Inhalt	1 Stück
Marke Hersteller	PRIMED
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Indikationen Box für Zahnprothesen und Zahnspangen: zur hygienischen Aufbewahrung von Zahnprothesen und Zahnspangen mit Sieb zur einfachen Reinigung und Desinfektion von Zahnprothesen und Zahnspangen aus bruchsicherem Polypropylen, sterilisierbar bis 130°C Praktisches, sicheres und flexibles Produkt, zertifiziert vom Nationalen Institut für Hygiene **Aktivität** Dank eines praktischen Siebes ist die Reinigung der Prothese einfach und hygienisch. Die Prothese kommt nicht direkt mit der Reinigungstablette in Berührung. Das Sieb ermöglicht es auch, die Prothese unter fließendem Wasser gründlich abzuspülen, ohne sie mit den Händen zu berühren, und sie anschließend zu trocknen. Nach dem Waschen und Trocknen wird die Prothese auf dem Sieb mit einem Deckel aufbewahrt, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. **Dosierung** 1. Heben Sie das Sieb an und legen Sie die Reinigungstablette in die Box. 2. Legen Sie die Prothese auf das Sieb und legen Sie sie in die Box. 3. die Box mit warmem Wasser füllen, so dass die Prothese vollständig unter Wasser steht. 4. nach der Reinigung die Prothese zusammen mit dem Sieb aus der Box nehmen. 5. unter fließendem Wasser gut abspülen. 6. das Sieb mit der sauberen Prothese in die gewaschene Box legen und mit einem Deckel verschließen.