

## PROTEFIX Fixiercreme 47 g

Preis: 4,80 €



## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Creme
Inhalt	40 ml
Marke Hersteller	QUEISSER PHARMA
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Allgemeine Hinweise** Die Fixiercreme ist kein Ersatz für eine gute Prothesenanpassung durch Ihren Zahnarzt oder Prothetiker. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Creme weniger gut wirkt als sonst oder während der Anwendung ausläuft, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bei wiederkehrenden Entzündungen oder Schleimhautschäden sollte vor der Anwendung der Creme ein Zahnarzt aufgesucht werden. Die Verwendung einer Prothese erfordert eine regelmäßige Hygiene der Mundhöhle und der Prothese selbst. Hierfür empfehlen wir die Reinigung der Prothese mit Protefix® HIGIENA Reinigungspaste. Die Prothese sollte einmal pro Woche mit Protefix® HIGIENA Reinigungstabletten desinfiziert werden. Bei richtiger Anwendung der Creme können kleine Mengen auf natürliche Weise geschluckt werden, was für den Organismus nicht schädlich ist. Bei der oben genannten Anwendungsweise kann die Creme lange Zeit verwendet werden. **Reinigung der Prothese und der Mundhöhle** Den Mund mit Wasser ausspülen. Bewegen Sie die Prothese vorsichtig und entfernen Sie sie. Sollten sich Cremereste auf der Prothese oder im Mund befinden, entfernen Sie diese mit einem mit warmem Wasser oder Speiseöl angefeuchteten Wattestäbchen. Reinigen Sie Zahnfleisch und Gaumen vorsichtig mit einer weichen Bürste. Reinigen Sie die Prothese von Speiseresten mit einer weichen Zahnbürste und Protefix® HIGIENA Paste. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen. **Anwendung der Creme** Tragen Sie die Fixiercreme auf die saubere, nasse oder trockene Prothese auf. Tragen Sie eine kleine Menge der Creme auf (in kurzen Abschnitten), die wie gezeigt verteilt sind. Es braucht mehrere Versuche, um festzustellen, wie viel Creme notwendig ist und gleichzeitig nicht unter der Prothese herausfließt. Die Prothese aufsetzen, andrücken und dann leicht zubeißen. Die Creme wirkt sofort nach dem Auftragen. Nach dem Öffnen der Tube kann Öl erscheinen, das die Grundlage der Creme ist. Entfernen Sie überschüssiges Öl, indem Sie es aus der Tube herausdrücken; dies hat keinen Einfluss auf die Klebekraft. Verschließen Sie die Tube nach Gebrauch sorgfältig und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Tube gelangt. In die Tube eindringende Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Fixiercreme aushärtet. **Zutaten** Mischung aus Natrium- und Calciumsalzen von Methylvinylether-Copolymer und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffinwachs, Vaseline, kolloidales Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin, Methylbenzoat