

PROTEFIX Fixierpulver 50 g



Preis: 6,70 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Pulver
Inhalt	50 g
Marke Hersteller	QUEISSER PHARMA
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Das bewährte Befestigungsmittel ist ideal bei kleineren Haftungsproblemen oder verdünntem Speichel. Das Protefix®-Befestigungspulver wird auf die nasse Prothese gestreut und zeigt sofort nach dem Einsetzen eine zuverlässige und lang anhaltende Haftung. Das geruchs- und geschmacksneutrale Protefix®-Befestigungspulver aus natürlichem Natriumalginat ist besonders für empfindliche Mundschleimhäute geeignet. **Anwendung** Das Protefix®-Befestigungspulver in einer gleichmäßigen, dünnen Schicht auf die feuchte Prothese auftragen. Unmittelbar nach dem Einsetzen wird die Prothese fixiert und hält viele Stunden im Mund. Im Falle einer vorzeitigen Lockerung - z.B. durch Trinken von viel Flüssigkeit - bestreuen Sie die Prothese einfach erneut mit einer dünnen Schicht Protefix® Befestigungspulver. Eventuelle Pulverreste lassen sich mit einer Zahnbürste unter fließendem Wasser leicht von der Prothese abwischen. Besonders hartnäckige Kleberreste können mit einem in Speiseöl getränkten Wattestäbchen entfernt werden. Um einen übermäßigen Verbrauch des Produkts zu vermeiden, drücken Sie die Flasche nicht zusammen, sondern halten Sie sie schräg und klopfen Sie sie vorsichtig mit dem Zeigefinger an. Dies gewährleistet eine genaue Dosierung. Wenn zu viel Fixierpulver verwendet wird, kann es aushärten und das Risiko einer Schädigung der Mundschleimhaut erhöhen. **Zutaten** Natriumalginat