

PROTEFIX Hypoallergene Fixiercreme 47 g

Preis: 5,28 €



Beschreibung im Wörterbuch

Form	Creme
Inhalt	47 g
Marke Hersteller	QUEISSER PHARMA
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Protefix Hypoallergene Fixiercreme enthält keine Konservierungs-, Farb- oder Duftstoffe. Es kann daher von Personen verwendet werden, die besonders anfällig für allergische Reaktionen sind, da es das Risiko allergischer Reaktionen verringert. Gleichzeitig behält sie alle fixierenden Eigenschaften der Original-Protefix-Creme. **Anwendung** Tragen Sie die Fixiercreme auf eine saubere, feuchte oder trockene Prothese auf. Tragen Sie eine kleine Menge der Creme (in kurzen Abschnitten) in Intervallen auf. Es braucht mehrere Versuche, um festzustellen, wie viel Creme notwendig ist und gleichzeitig nicht unter der Prothese herausfließt. Die Prothese aufsetzen, andrücken und dann leicht zubeißen. Die Creme wirkt sofort nach dem Auftragen.

Beim Öffnen der Tube kann das Öl, das die Grundlage der Creme bildet, zum Vorschein kommen. Entfernen Sie überschüssiges Öl, indem Sie es aus der Tube drücken; dies beeinträchtigt die Klebekraft nicht. Verschließen Sie die Tube nach Gebrauch sorgfältig und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Tube gelangt. Wenn Feuchtigkeit in die Tube gelangt, kann die Fixiercreme aushärten. **Inhaltsstoffe** Gemisch aus Na- und Ca-Salzen eines Copolymers aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, kolloidales Siliciumdioxid.