

Rosa Super-Sensitiv-Schwangerschaftstest 1 Stück



Preis: 1,46 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Test
Inhalt	1 Stück
Marke Hersteller	HYDREX DIAGNOSTICS
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Schwangerschaftstest auf Platte, der zu Hause verwendet werden kann. Die Wirksamkeit des Pink Schwangerschaftstests beim Nachweis einer Schwangerschaft liegt bei 99,9 %. Der Pink Super Sensitive Test weist Choriongonadotropin, ein Hormon, das bei schwangeren Frauen vorkommt, im Urin nach. Die monoklonalen Anti-v-hCG-Antikörper, die sich auf der Oberfläche der Testplatte befinden, reagieren mit dem Hormon und zeigen ein zuverlässiges Ergebnis an. Die Empfindlichkeit des Tests beträgt 10 mIU/ml.

Funktion Der Schwangerschaftstest weist das Hormon hCG (humanes Choriongonadotropin) im Urin nach. Dieses Hormon wird vom Körper einer Frau produziert, wenn sie schwanger ist. Mit fortschreitender Schwangerschaft steigt die Menge des hCG-Hormons im Urin an. **Anwendungsweise** Der Test wird mit frisch gesammeltem Urin durchgeführt. Morgenurin ist für den Test am besten geeignet, da er das meiste hCG enthält. Der Urin sollte in einem sauberen und trockenen Behälter gesammelt werden. Unmittelbar vor dem Test öffnen Sie den Folienumschlag, indem Sie ihn aufreißen. Nehmen Sie den Plattentest und die Plastikpipette aus dem Umschlag. Der Umschlag enthält auch ein Absorptionsmittel, das im Hausmüll entsorgt werden sollte. Legen Sie die Testplatte auf eine waagerechte Fläche. Tauchen Sie die Spitze der Kunststoffpipette in den zu testenden Urin. Drücken Sie den oberen Teil der Pipette zusammen und füllen Sie sie mit Urin. Messen Sie langsam 3 volle Tropfen Urin in das ovale Fenster auf der Testplatte. Um die korrekte Durchführung des Tests zu gewährleisten, halten Sie die Pipette senkrecht, etwa 1 cm über der Oberfläche der Testplatte, so dass sich große, frei fallende Tropfen ohne Luftblasen bilden. Beobachten Sie die Bewegung der Urinprobe im Löschpapier durch die Testzone T und die Kontrollzone C des Tests. Warten Sie, bis farbige Streifen im Ergebnisfenster erscheinen. Lesen Sie das Testergebnis nach 2 bis 5 Minuten ab, nachdem der Urin in das ovale Fenster auf der Testplatte eingeführt wurde. Wenn keine farbige Linie erscheint, warten Sie weitere 1 Minute. Ein Ergebnis, das nach mehr als 10 Minuten erzielt wird, darf nicht berücksichtigt werden. **Inhalt** 1 Folienumschlag mit 1 Test- und Absorptionsmittel, 1 Pipette 1 Gebrauchsanweisung für das Produkt **Lagerungsmethode** unter 30°C