

# VITAM Streaming-Schwangerschaftstest

Preis: 1,24 €



## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Test
Inhalt	1 Stück
Marke Hersteller	DIAGNOSIS
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

Einfach - selbst durchzuführen Empfindlich - erkennt hCG bei einer Konzentration von 10 mIU/ml Konsistent - die Zuverlässigkeit des Tests liegt bei 98% Genau - kann bereits ab dem 2.3 Tage Schwangerschaft Schnell - Ergebnis innerhalb von 5 Minuten Komfortabel - keine Notwendigkeit, Urin zu sammeln. **Indikation** Das Produkt ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt, nur zur äußeren Anwendung. Medizinisches Gerät für Selbsttests. Nach der Durchführung des Tests sollten Sie keine medizinischen Maßnahmen ergreifen, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren. **Anwendungsweise** Fassen Sie mit einer Hand die runde Spitze des Testgehäuses. Mit der anderen Hand entfernen Sie die Kappe der Saugerspitze, so dass das Absorptionsmittel nicht bedeckt ist. Richten Sie den Abschnitt der Saugerspitze nach unten und legen Sie die Saugerspitze für etwa 10 Sekunden in den Urinstrahl, so dass sie gründlich gesättigt ist. Nach der Durchführung des Tests setzen Sie die Kappe auf und warten, bis die Farblinie erscheint. Ein positives Ergebnis wird bereits nach 1 Minute angezeigt. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, müssen Sie jedoch 3 Minuten warten. Testauswertung **POSITIVES ERGEBNIS:** Wenn Linien in der Kontrollzone (C) und der Testzone (T) erscheinen, bedeutet dies, dass Sie schwanger sind. **NEGATIVES ERGEBNIS:** Wenn eine Linie nur in der Kontrollzone (C) erscheint, bedeutet dies, dass Sie nicht schwanger sind. **NEGATIVES ERGEBNIS:** 1. Eine Linie erscheint nur in der Testzone (T) und wird nicht in der Zone (C) erscheinen. 2. In der Testzone (T) und in der Kontrollzone (C) erscheint keine Linie.