

AVENT Silikon-Brusthauben Größe M 2tlg.

Preis: 16,41 €



Beschreibung im Wörterbuch

Form	-
Inhalt	2 Stück
Kategorie	Arzneimittel
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Die Brusthütchen wurden entwickelt, um Müttern beim Stillen zu helfen, wenn sie Probleme mit den Brustwarzen haben oder wenn das Baby Schwierigkeiten beim Saugen hat. Das ultradünne, schmetterlingsförmige Brusthütchen ermöglicht dem Baby den Kontakt mit der Brust und stört nicht die Bindung zum Baby während des Fütterns. Form für Hautkontakt Schützt gereizte Brustwarzen Größe mittel (21 mm) 2 Stück. **Anwendung** Reinigen Sie die Nippelschilder vor jedem Gebrauch. Es dauert weniger als 10 Minuten. Legen Sie die Schilder für fünf Minuten in kochendes Wasser oder verwenden Sie das spezielle Etui.

Die gut gespülten Dämme hineinlegen und 25 ml Wasser dazugeben. Dann die Dämme in die Mikrowelle legen und die Leistung 750-1000 W für 3 Minuten einschalten. Fünf Minuten warten, bis sie abgekühlt sind. Gießen Sie das Wasser ab. Die Dämme sind einsatzbereit. Nutzen Sie dieses praktische Etui für die Reinigung der Dämme auf Reisen. Natürlich dient es auch zur Aufbewahrung.