

## HelpMedi DinoRino Mundkatarrh-Sauger 1 Stück

Preis: 5,77 €



## Beschreibung im Wörterbuch

|         |           |
|---------|-----------|
| Form    | Irrigator |
| Inhalt  | 1 Stück   |
| Versand | in 24h    |

## Produktbeschreibung

DinoRino, der orale Katarrhsauger, ist ein medizinisches Gerät, das entwickelt wurde, um die Nase von Babys ab den ersten Lebenstagen zu reinigen. Sie eignet sich bei allergischen oder wässrigen Schnupfennasen sowie zur täglichen Reinigung der Nase von kleinen Ablagerungen. Die ergonomische Form des Absaugers, die zum Mund passende Mundstückspitze und die Konstruktion aus Sekretkammer mit Filter, Schlauch und Mundstück erhöhen den Komfort und die Sicherheit bei der Anwendung. Anti-Stress-Pads sind am Produkt angebracht. **Packungsinhalt** DinoRino, HelpMedi Nasensauger, 1 Stück. **Zweck des Produkts** Für Kinder ab 0 m. **Indikationen** Das Produkt ist für die tägliche Nasenhygiene der Kleinsten und bei leichtem Schnupfen, auch allergisch, zur Abschwellung der Nase bestimmt. **Anwendung des Medizinprodukts** Vor dem Reinigen eine kleine Menge Kochsalzlösung auf die Nase des Kindes träufeln. Dann setzen Sie den Filter in die Kammer ein und verbinden die beiden Teile der Kammer miteinander (es ist erlaubt, den Sauger ohne Filter zu verwenden). Um die Nase zu reinigen, nehmen Sie das Mundstück in den Mund und setzen das Ende der Kammer abwechselnd an die Nasenöffnungen des Kindes an und saugen durch Ansaugen der Luft. Dies sollte wiederholt werden, bis das Nasensekret vollständig gereinigt ist. Nach der Reinigung die Kammern öffnen, die Kappe abnehmen und an einen trockenen Ort stellen. Der Filter sollte entfernt und die Kammern gründlich mit warmem Wasser und Seife oder Spülmittel gewaschen und getrocknet werden.