

Ferti Lily Insemination Support Gel 50 ml



Preis:33,22 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	50 ml
Form	Gel
Inhalt	50 ml
Kategorie	Medizinische Geräte andere
Marke Hersteller	SALVEO
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Ein Medizinprodukt in Form eines Gleitmittels zur Unterstützung der Empfängnis. Das Produkt wurde für Paare entwickelt, die versuchen, ein Kind zu bekommen. Es besitzt feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und schafft ein spermienfreundliches Umfeld.

Zusammensetzung Wasser, Phenethylalkohol, Natriumhyaluronat, Xanthan Gum, Fructose, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat, Kalium, Phosphat, Zitronensäure.

Wirkung Das Medizinprodukt Ferti Lily Gel ist ein Gleitmittel, dessen Wirkung neben den feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften zu einem erhöhten Komfort beim Geschlechtsverkehr führt. Das Präparat enthält Fructose - einen Zucker, der natürlich in Obst und Honig vorkommt und im Produkt als Energieträger für die Spermien dient. Indem es den natürlichen Schleim nachahmt, schafft das Gel eine sichere Umgebung für Spermien und unterstützt so die Fruchtbarkeit.

Anwendungshinweise Um die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, wird empfohlen, das Gel während des Eisprungs anzuwenden. Drücken Sie eine kleine Menge des Gels auf Ihre Handfläche und tragen Sie es auf den Intimbereich auf. Die Menge des Gels sollte den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Nach jeder Anwendung des Gels sollte die Tube sorgfältig verschlossen werden.

Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung des Produkts. Nicht anwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts allergisch sind. Wenn beunruhigende Symptome oder Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Anwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur auf. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung zuvor geöffnet oder beschädigt wurde.