

# FEMINUM Feuchtigkeitspendendes Intimgel für Frauen 40 ml



Preis:4,58 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Gel
Inhalt	40 ml
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	MASTERS SP. Z O.O.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Zusammensetzung** Gereinigtes Wasser, Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Milchsäure, Methylhydroxybenzoat, Propylhydroxybenzoat.

**Indikationen und Wirkungen** Feminum Gel ist ein spezielles Mittel zur Beseitigung von Mängeln der Schleimsekretion in der Vagina. Es erleichtert den Geschlechtsverkehr bei vaginaler Trockenheit, auch bei Verwendung von Kondomen. Feminum Gel wird auch in der Medizin eingesetzt: Es erleichtert medizinische Untersuchungen wie gynäkologische Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, transanale Untersuchungen und die Durchführung bestimmter Eingriffe. Es wirkt auch als Hilfsmittel bei Erkrankungen, die mit Trockenheit der Schleimhäute einhergehen. Feminum Gel ist ein klinisch getestetes Präparat. Feminum Gel kann mehrmals täglich, ohne Altersbeschränkung, regelmäßig und je nach Bedarf sowohl von schwangeren Frauen als auch von stillenden Müttern angewendet werden. Die Langzeitanwendung des Präparats stört den Hormonhaushalt des Körpers nicht und bleibt für die Haut neutral. Die Verwendung anderer unfallverursachender Mittel, die Fett oder wasserunlösliche Stoffe enthalten, wie Cremes, Lotionen und Öle, kann zu Reizungen, Rötungen und Schmerzen führen. Feminum Gel ist ein völlig neutrales Präparat, das keine Flecken auf der Unterwäsche hinterlässt. Im Zweifelsfall wird Ihnen Ihr Arzt/Gynäkologe weitere Informationen geben. Das feuchtigkeitspendende Gel von Feminum trägt dank seines Milchsäuregehalts zur Wiederherstellung des sauren pH-Werts von 3,8 bis 4,2 bei, wodurch die Entwicklung von Mikroorganismen, die für vaginale Infektionen verantwortlich sind, deutlich gehemmt wird. Eine gesunde und straffe Dammhaut garantiert die korrekte physiologische Funktion dieses Teils des weiblichen Körpers. **Anwendung** Eine kleine Menge (je nach Bedarf) sollte auf die speziell von Schürfwunden betroffenen Stellen aufgetragen werden - auch vor intimen Kontakten oder Untersuchungen. Es kann auch direkt auf ein Kondom aufgetragen werden. Verwenden Sie bei Bedarf mehr Gel. **Hinweis** Feminum Gel ist kein Verhütungsmittel. Bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Präparats sollte die Anwendung des Gels unterbrochen werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.